



адгезив
DentaBond

BENK GmbH
info@benk.net
www.benk.net

Niehlerstr. 46
D-50733 KÖLN
G E R M A N Y

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ОАО ПТО МЕДТЕХНИКА

225730 Республика Беларусь
Брестская обл., Пинский район,
д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31
тел./факс: +375 165 38 06 74,
38 07 55, 37 99 23, 37 99 24

Светоотверждаемый адгезив DentaBond

Рег. № ИМ-7.92671, действителен до 27.02.2012г.

Информация для использования: DentaBond это адгезив с высокой связью с дентином и протравленной эмалью. Он улучшает адгезию между композитным материалом и поверхностью зуба.

Показания к применению: DentaBond служит для улучшения связи между композитным материалом и эмалью и дентином зуба. При использовании «сэндвич-техники» улучшает связь между стеклоиономерным цементом и композитным материалом.

Применение: Отпрепарировать полость в соответствии с правилами техники адгезивного пломбирования. В зависимости от ситуации при глубоких полостях должна применяться прокладка на основе гидроксида кальция. Согласно адгезивной технике твердые ткани должны быть протравлены, промыты и высушены. При пломбировании стеклоиономерным цементом травить не нужно, достаточно втереть адгезив.

После того, как отпрепарированная полость высушена, капнуть 1-2 капли светоотверждаемого адгезива DentaBond на поверхность для смешивания (флакон сейчас же закрыть) и с помощью кисточки или поролонового аппликатора нанести тонким слоем по всей поверхности полости. Затем отвердить при помощи галогенного света в течении 15 сек.

Противопоказания: Не применять DentaBond в области пульпы.

Указания по применению: Обратите внимание на указания при применении и меры предосторожности. Если при соблюдении всех инструкций все же произошла нежелательная реакция у пациента или же случилось еще что-нибудь, мы просим Вас сообщить нам об этом с описанием обстоятельств.

Хранение: Срок хранения 3 года. Хранить в сухом прохладном темном месте.

Упаковка

1x5мл Dentabond
4 палеты для смешивания
50 микрокисточек