

BENK



— GmbH —

Ätzel

DentaEtch

Zum Auftragen auf den Zahnschmelz

Niehlstr. 46
D-50733 KÖLN
G E R M A N Y

BENK GmbH
info@benk.net
www.benk.net

Dentaetch Ätzel

Gebrauchsinformation:

Ein thixotropes Ätzel mit einem Anteil von 37% Phosphorsäure. Dank der anwendungsfreundlichen Verpackung in einer 2,0ml-Spritze, mit äußerst dünnen Kanülen, kann es sicher und genau dosiert und an der gewünschten Stelle appliziert werden.

Vorbereitung der Dentaetch-Spritze:

Entfernen Sie die Verschlusskappe der Spritze und setzen Sie eine der mitgelieferten Kanülen auf. Gegebenenfalls kann die Kanüle ein wenig gebogen werden, um so die Applikation zu erleichtern. VORSICHT! Vor der ersten Anwendung sollte ein wenig Dentaetch aus der Spritze herausgedrückt werden um das „Herausschießen“ des Dentaetchs durch Luftfeinschlüsse in der Spritze zu verhindern.

Anwendung:

Tragen Sie das Dentaetch nur auf den Zahnschmelz auf, vermeiden Sie den Kontakt mit dem Dentin und den Zahnkanten. Lassen Sie das Dentaetch für mindestens 15 Sekunden einwirken. Bei jungen Zähnen, die mit Fluoridierungslack behandelt wurden, wird empfohlen, die Einwirkphase auf 90-120 Sekunden auszudehnen. Im Anschluß wird das Dentaetch für ca. 20 Sekunden mit fließendem Wasser abgespült. Trocknen Sie anschließend die applizierte Stelle mit dem Luftbläser unter Verwendung von öl- und wasserfreier Luft. Der angeätzte Schmelz sollte danach eine milchig-kalkweiße Farbe zeigen.

Nebenwirkungen:

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine Hypersensitivität gegen Komponenten des Materials nicht auszuschließen. Hautkontakt mit Paste vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen auch in Zweifelsfällen bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome.

Verarbeitungshinweise:

Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsinformation beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

Vorsichtsmaßnahmen:

Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der angeätzte Zahnschmelz nicht anderweitig kontaminiert wurde. Sollte eine Kontamination mit anderen Flüssigkeiten vorliegen, muß nachgeätzt werden, anschließend wiederum mit fließendem Wasser nachspülen und wie oben beschrieben trocknen. Vermeiden Sie absolut den Kontakt von Dentaetch mit den Schleimhäuten, Augen und der Haut. Sollte versehentlich ein solcher Kontakt vorkommen, reinigen Sie sofort diese Stelle mit ausreichend fließend Wasser.

Verarbeiten des Adhäsivs:

Bringen Sie das Adhäsiv Ihrer Wahl mit einem Pinsel auf die speichelfreie und trockene, angeätzte Schmelzoberfläche auf. Gehen Sie hierbei nach der Gebrauchsinformation für das Adhäsiv vor.

Platzierung, Aushärtung und Fertigstellung:

Befolgen Sie betreffend der Platzierung, Aushärtung und Fertigstellung die Gebrauchsinformation des Herstellers für das betreffende Material.

Lagerung:

Lagerzeit 3 Jahre bei 23°C

Packungsart:

1 x 2,0ml Spritzen
10 Kanülen

www.benk.net

info@benk.net