

BENK

— GmbH —

протравочный гель

DentaEtch**для зубной эмали**Nehlerstr. 46
D-50733 KÖLN
G E R M A N YBENK GmbH
info@benk.net
www.benk.net**Протравочный гель DentaEtch**

Reg. № ИМ-7.92671, действителен до 27.02.20012г.

Текущий протравочный гель DentaEtch с долей фосфорной кислоты 37 %. Удобен в применении благодаря упаковке в 2,0 мл-шприце с внешней тонкой канюлей, что помогает точно дозировать и наносить на желаемое место.

Подготовка шприца с протравочным гелем:

Удалить колпачок шприца и одеть на шприц одну из прилагаемых канюлей. При необходимости канюлю можно немного согнуть, тем самым облегчая применение.

ОСТОРОЖНО! Перед первым применением необходимо немного выдавить гель из шприца, чтобы удалить лишний воздух.

Применение:

Нанести гель на поверхность зубной эмали и выдержать по меньшей мере 15 секунд. Затем нанести гель на поверхность дентина и выдержать еще 15 секунд. Удалить излишки геля ватным или поролоновым тампоном. Обильно промыть полость проточной водой в течении 20 секунд. Осторожно высушить обработанное место струей сухого воздуха без примесей масла, избегая пересушивания.

Побочные действия:

До сих пор не выявлено никаких побочных действий. В единичных случаях не исключается повышенная чувствительность к компонентам материала. Избегайте контакта кожи с материалом. При случайном контакте промойте сразу с водой и мылом. При контакте с глазами промойте с большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Если вам известны какие-нибудь побочные явления, даже если вы сомневаетесь, сообщите об этом пожалуйста с указанием точных обстоятельств и симптомов.

Указания по применению:

Обратите внимание на указания при применении и меры предосторожности. Если при соблюдении всех инструкций все же произошла нежелательная реакция у пациента или же случилось еще что-нибудь, мы просим Вас сообщить нам об этом с описанием обстоятельств.

Меры предосторожности:

Очень важно, чтобы протравленная эмаль зуба дальше не подвергалась загрязнению. Если это произошло, нужно протравить еще раз, потом промыть холодной водой и высушить снова. Избегайте контакта геля со слизистыми поверхностями, глазами и кожей. Если контакт все же произошел, тщательно промойте водой.

Хранение:

Срок хранения 3 года. Хранить при температуре не выше 23С. Не использовать после истечения срока годности.

Упаковка:

Шприц объемом 2,0 мл.
10 канюль

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ОАО ПТО МЕДТЕХНИКА**

225730 Республика Беларусь
Брестская обл., Пинский район,
д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31
тел./факс: +375 165 38 06 74,
38 07 55, 37 99 23, 37 99 24

www.medtehnika.bymail@medtehnika.by