



GmbH

универсальный композит

# DentaFill

Nieherstr. 46  
D-50733 KÖLN  
GERMANY

BENK GmbH  
info@benk.net  
www.benk.net

для реставрации полостей всех классов

## Композитный материал DentaFill

Reg. № ИМ-7.92671, действителен до 27.02.2012г.

**Информация для использования:** Материал **DentaFill** является универсальным световым рентгеноконтрастным универсальным композитом для реставраций полостей всех классов. Благодаря своей отличной моделирующей способности, он очень хорошо подходит для многоцветной послойной техники. Это гарантирует не только естественное и высокоэстетичное пломбирование, но и минимизирует полимеризационную усадку.

**Показания к применению:** Реставрация полостей всех типов.

**Рекомендуемое применение:** Очистить зуб, все лишнее вымыть водой. Определить цвет по шкале VITA.

Рекомендуется применение коффердама.

1. Подготовить полость согласно общим правилам адгезивной техники.

2. Протравить полость в соответствии с техникой тотального протравливания.

В случае применения иной техники используйте инструкцию по применению адгезива.

3. Нанести адгезив (например **DentaBond**).

4. При необходимости нанести первый слой из жидкотекучего композита или компомера. Рекомендуется применение матрицы.

5. Пломбировать полость материалом выбранного цвета слоями максимальной толщиной 2 мм. Полимеризовать каждый слой 20 сек. Продолжительность полимеризации зависит также от интенсивности света полимеризационной лампы.

6. Удалить излишки пломбы. Контурирование и окончательную обработку выполнить с использованием алмазных боров и гибких дисков соответствующей зернистости. Окончательная полировка может проводиться полировочными пастами с применением полировочных чашечек/дисков.

**Обязательно обратите внимание:** Световые приборы должны излучать свет с длиной волны 450 нм и регулярно проверяться.

Не удаляйте ингибированный слой, так как он понадобится для связи со следующим слоем.

Обращайте внимание на инструкции к другим материалам, которые Вы используете совместно с материалом

**DentaFill.**

**Взаимодействия с другими материалами:** Избегайте контакта материала **DentaFill** с эвгенолсодержащими материалами, водой и воздухом, содержащим масла, иначе Вы можете нарушить процесс полимеризации. При применении катионактивных полискателей или хлортексидина может изменяться цвет реставрации.

**Противопоказания:** Применение материала **DentaFill** противопоказано, если невозможно осушение или применение рекомендованной техники. Не наносить прямо на открытую пульпу и не применять, если известно об аллергии на составляющие препарата.

**Побочные действия:** До сих пор не выявлено никаких побочных действий. В единичных случаях не исключается повышенная чувствительность к компонентам материала. Избегайте контакта кожи с материалом. При случайном контакте промойте сразу с водой и мылом. При контакте с глазами промойте с большим количеством воды и обратитесь к врачу. Если вам известны какие-нибудь побочные явления, даже если вы сомневаетесь, сообщите об этом с указанием точных обстоятельств и симптомов.

### Указания по применению:

Обратите внимание на указания по рекомендуемому применению и меры предосторожности. Если при соблюдении всех инструкций все же произошла нежелательная реакция у пациента или же случилось еще что-нибудь, мы просим Вас сообщить нам об этом с описанием обстоятельств.

**Состав:** Стекланный наполнитель в BIS-GMA матрице (олигомеры диметакрилатов), пигменты, добавки, катализатор. Составляющая доля наполнителя: 76 % по массе = 57 % по объему (0,02-1,5 мкм).

### Классификация:

Композит универсал соответствует требованиям DIN EN ISO 4049. Reg. № ИМ - 7.92671, действителен до 27.02.2012г.

**Хранение:** Срок хранения 3 года. Хранить при температуре не выше 25С. После использования шприцы сразу же закрывать защитным колпачком для предотвращения затвердевания материала. Не использовать после истечения срока годности.

### Виды:

DentaFill A1	4,5g шприц
DentaFill A2	4,5g шприц
DentaFill A3	4,5g шприц
DentaFill OA2	4,5g шприц
DentaFill OA3	4,5g шприц
DentaFill A3,5	4,5g шприц
DentaFill OB2	4,5g шприц
DentaFill C2	4,5g шприц
DentaFill D3	4,5g шприц
DentaFill I	4,5g шприц

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
ОАО ПТО МЕДТЕХНИКА

225730 Республика Беларусь  
Брестская обл., Пинский район,  
д. Пинковичи, ул. Полевая, д. 31  
тел./факс: +375 165 38 06 74,  
38 07 55, 37 99 23, 37 99 24

www.medtekhnika.by

mail@medtekhnika.by